

## Le FULLSKIN®, un appareil conçu pour vous assister dans la plupart des pathologies que vous avez à traiter



La technologie mise en œuvre par le FULLSKIN® V7 combine à la fois l'aspiration et le massage, l'étirement et la mobilisation du pli cutané pour le confort du praticien et pour le bénéfice de ses patients.

Elle vous permet de gagner du temps lors des traitements tout en conservant leur efficacité. L'utilisation du FULLSKIN® permet de réduire sensiblement la durée d'une séance de soin (diminution pouvant aller jusqu'à 30%) ce qui réduit la fatigue.

Le soin est régulier tout au long du traitement ce qui est impossible avec un traitement manuel.

## Quels sont les effets de l'utilisation du FULLSKIN<sup>®</sup> ?

« Cette technique permet une action vasodilatatrice, décontractante, drainante, tonifiante, sédative. Elle permet aussi la récupération de l'élasticité musculaire et le traitement des lésions cutanées ».

P. SANTERO Ostéopathe – P. DORIE & F. LAGNIAUX M.K – P. DELIAC Médecin neurophysiologiste – Profession Kiné Mars 2013.

- Effet de décompression : améliore la circulation lymphatique.
- Effet d'hyper vascularisation : oxygénation et stimulation de la circulation locale. Augmentation de la perfusion cutanée (multipliée par 4 pendant les 6 heures suivant le soin).
- Effet drainant : relance le processus d'élimination des déchets organiques et des liquides excédentaires.
- Effet tonifiant : stimulation des fibroblastes (production de collagène). Augmentation du nombre de fibres de collagène et des fibroblastes (de 27 à 130 % selon les patients).
- Effet « défibrosant » : assouplissement du tissu conjonctif. Amélioration de la souplesse des tissus. Aménagement des fibres de collagène : réorientation en vagues au lieu de nœuds.

Augmentation de l'épaisseur du derme qui va perdurer dans le temps et réduction de sa densité (il devient plus tendre).

- Effet antalgique : stimulation des mécanorécepteurs – augmentation des gènes de protéines anti-inflammatoires.
- Effet réflexe : par la sollicitation des stimulations nerveuses de la fonction pulsée.

## Applications :

- Atteintes cutanées (cicatrices, brûlures)



*Source : Laetitia KEYEN - La « Dermotonie » (dépresso-technologie) est-elle efficace dans le traitement des cicatrices post-chirurgicales ?  
Université de Charleroi IESCI Montignies/Sambre*

- Atteintes musculo-squelettiques – hypo-mobilité tissulaire
- Atteintes circulatoires – drainage lymphatique.
- Traitement du surpoids



- Préparation et récupération sportive.



## Ce qu'apporte le FULLSKIN ® à son utilisateur :



- La pluralité des accessoires de soins permet de s'adapter aux différentes régions du corps du patient et en particulier sur des zones de petite taille (mains, pieds...). Les têtes à billes sont sans pincement.
- Le réglage progressif de la vitesse de rotation de la tête motorisée permet d'adapter de manière plus fine le travail en profondeur dans les trois plans de la zone de traitement.
- Le mode de rotation alternatif de la tête motorisée autorise le traitement des zones fortement indurées des brides cicatricielles sévères.
- Tête motorisée conçue de façon ergonomique (pour gauchers et droitiers).
- Le FULLSKIN® ne nécessite pas l'utilisation d'autres accessoires tels que combinaison, collants... ou de produits particuliers

Le tout pour un meilleur confort du patient et des résultats significatifs.

A ce jour, plus de 1600 appareils de la gamme SKIN ont été commercialisés dans le monde et certains appareils vendus il y a plus de vingt ans sont encore utilisés.

